



ResMed

AirFit™ P30i

Guía de ajuste de la mascarilla AirFit P30i



- Pase el armazón y el arnés sobre la cabeza hasta que el codo esté en la parte superior y el arnés esté detrás de la cabeza.



- Coloque la almohadilla debajo de la nariz y alinee las almohadillas en las fosas nasales.



- Ajuste o afloje el arnés hasta que la almohadilla se adapte con comodidad debajo de la nariz.



- Apriete los botones del costado en el codo y desconéctelo del armazón. Conecte el tubo de aire del dispositivo al codo y luego reconéctelo al armazón.

Opciones adicionales

En el caso de pacientes con cabello más largo, recomendamos que el cabello se haga pasar a través de la parte trasera del arnés. Si el cabello está atado tipo cola de caballo, esta debe hacerse lo suficientemente alta como para ajustarse cómodamente a través de la parte trasera del arnés. Consulte el manual del usuario para obtener más instrucciones y la información completa sobre la etiqueta en lo que concierne a las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

1 Estudio clínico externo guiado por ResMed de 23 usuarios actuales de la mascarilla con almohadillas nasales desde mayo hasta junio de 2018, en Sydney, Australia, quienes probaron la mascarilla AirFit P30i de ResMed y las almohadillas de gel DreamWear de Phillips™ Respironics. Un participante retiró su consentimiento después de completar el estudio (n = 22). Distribuido por ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 EE. UU. +1 858 836 5000 o 1 800 424 0737 (llamada gratuita). Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, visite ResMed.com. AirFit es una marca comercial y/o una marca comercial registrada de la familia de compañías ResMed. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Para obtener información sobre patentes y otra información acerca de propiedades intelectuales, consulte ResMed.com/ip. © 2019 ResMed. 10111531 2019-07

ResMed.com/AirFitP30i



Una nueva opción de almohadillas nasales

ResMed AirFit™ P30i ofrece una opción de almohadillas nasales para los pacientes que prefieren un diseño de tubo en la parte superior de la cabeza. Al igual que la mascarilla AirFit N30i, presenta el armazón SpringFit diseñado para adaptarse al rostro de cada paciente con tan solo dos tamaños de armazón, lo cual ayuda a optimizar el tiempo de ajuste y el control de SKU.



ResMed.com/AirFitP30i



Características destacadas de AirFit P30i

El codo de liberación rápida permite una desconexión fácil. El codo de clip a presión se mantiene conectado al tubo para asegurarse de que las partes no se atasquen ni se pierdan.

El armazón SpringFit se ajusta automáticamente a diferentes perfiles faciales, lo que ayuda a brindar un ajuste desde la primera vez.

La almohadilla de las almohadillas nasales es intercambiable con la olivas nasales con soporte nasal de la mascarilla AirFit N30i.

El diseño de la parte superior de la cabeza brinda a los pacientes la libertad de dormir en cualquier posición y más cerca de su pareja.

Las fundas suaves están diseñadas para una comodidad adicional y una disminución de las marcas faciales.

La ventilación QuietAir™ dispersa el aire exhalado para tener una experiencia tranquila que interrumpa menos el sueño de su pareja.

Códigos de los productos AirFit P30i

Sistemas completos de mascarillas (incluye sistema de armazón, arnés y 2 tamaños más de almohadillas)	Código del producto
AirFit P30i STPK AMER – STD	63850
AirFit P30i STPK AMER – SML	63851
Airfit P30i Sleep Lab Mask STPK – STD	63871
Airfit P30i Sleep Lab Mask STPK – SML	63872
Sistemas de armazón (incluye armazón, almohadilla y codo)	
AirFit P30i STD Frame Sys – L	63852
AirFit P30i SML Frame Sys – L	63853
AirFit P30i STD Frame Sys – M	63854
AirFit P30i SML Frame Sys – M	63855
AirFit P30i STD Frame Sys – S	63856
AirFit P30i SML Frame Sys – S	63857

Accesorios	Código del producto
AirFit P30i Pillow – S	63861
AirFit P30i Pillow – M	63862
AirFit P30i Pillow – L	63863
AirFit 30i Headgear	63814

Mascarilla AirFit P30i en comparación con las almohadillas nasales de la competência

En un estudio reciente, la mayoría de los pacientes prefirió la mascarilla AirFit P30i antes que las almohadillas nasales de la competência por su rendimiento general. De los que expresaron su preferencia, más del 70 % indicó que tenía un mejor sellado y el 66 % indicó que era más fácil de usar.¹

